


ALMA

کتابچه راهنمای بخور سرد و گرم آلما

مدل HCW-373

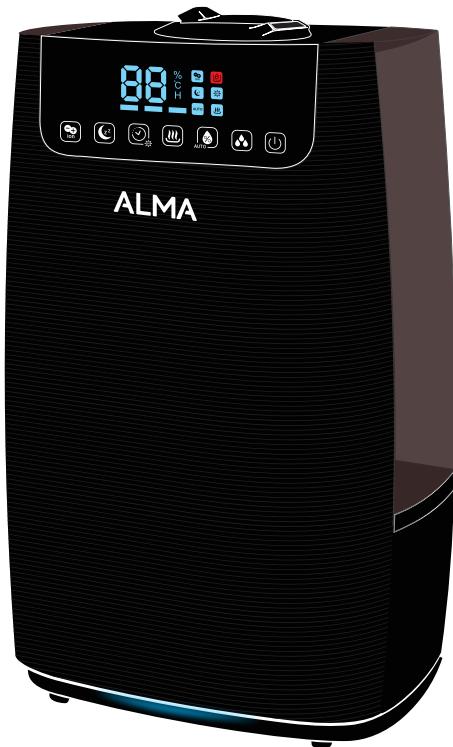

almaprime.com



almaprime



۰۲۱-۶۶۴۱۰۰۴۲

خریدار گرامی:

ضمن تشکر از شما، جهت خرید این محصول از شرکت زندگیتو بهتر کن، تبریک ما را با بت این انتخاب پذیرا باشید؛ امیدواریم دستگاه بخور سرد و گرم شما بتواند در سلامتی و لحظات شاد زندگیتان سهمی داشته باشد.

شرکت زندگیتو بهتر کن همواره در تلاش است که با ارتقاء کیفیت محصولات و ارائه خدمات بهتر، رضایت شما را جلب نماید و اعتقاد داریم که این رضایتمندی، کلید طلایی در موفقیت ما خواهد بود؛

در این راستا کتابچه راهنمای محصول، شامل نحوه استفاده و نگهداری از محصول برای شما تهیه شده است

تا در استفاده صحیح از امکانات دستگاه بخور سرد و گرم، نحوه نگهداری و شرایط بهره‌مندی از خدمات گارانتی و امدادی راهنمای شما باشد.



این کتابچه برای آگاهی شما از امکانات دستگاه بخور سرد و گرم، نحوه استفاده بهینه از آن، ضوابط استفاده از خدمات گارانتی و شرایط بهره‌مندی از خدمات پس از فروش تهیه شده همچنین حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است؛

لطفاً این کتابچه را همواره در دسترس داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشانید.

خطار: عدم توجه به دستورات در کادر اخطار (دارای علامت اخطار با رنگ قرمز)، منجر به آسیب دیدن جدی دستگاه می‌شود و دستگاه را از گارانتی خارج می‌کند.

هشدار: عدم توجه به دستورات در کادر هشدار دهنده (دارای علامت اخطار با رنگ زرد)، منجر به اختلال در عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.

دستگاه شما در یک نگاه

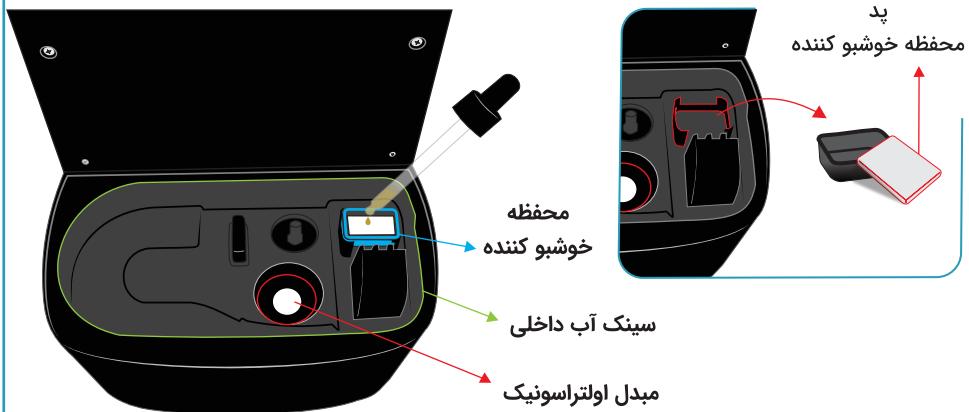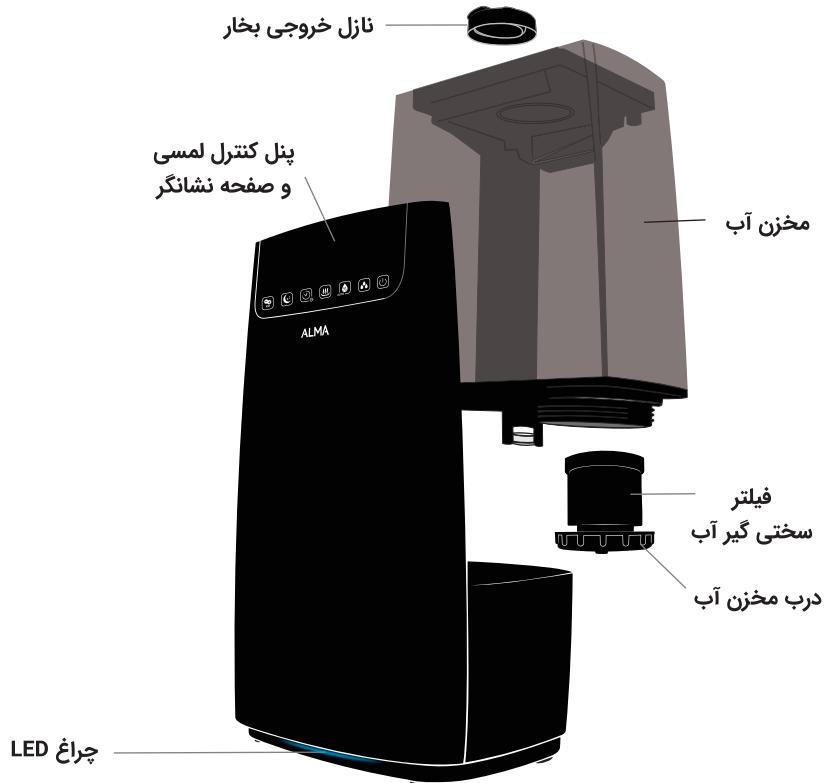

مشخصات فنی دستگاه



رنگ: مشکی

حجم مخزن: ۵ لیتر

میزان صدا: کمتر از ۴۰ دسیبل

برق ورودی: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز

زمان کارکرد (با مخزن پر و بیشترین درجه): ۱۵ ساعت

میزان مصرف برق: ۲۷ وات (بخور سرد)، ۱۰۵ وات (بخور گرم)

حداکثر بخاردهی: بخار سرد: ۳۰۰ / بخار گرم: ۴۵۰ میلی لیتر بر ساعت

ویژگی های عملکردی





- ۱) بخار گرم
- ۲) LED لامپ
- ۳) UV لامپ
- ۴) پنل لمسی
- ۵) حالت شب
- ۶) حالت خودکار
- ۷) ریموت کنترل
- ۸) فناوری یونایزر
- ۹) تایمیر ۱۰ ساعته
- ۱۰) نمایش دما و رطوبت
- ۱۱) محفظه خوشبو کننده
- ۱۲) تکنولوژی اولتراسونیک
- ۱۳) فیلتر سختی گیر آب (رزینی)
- ۱۴) خاموش کننده خودکار با اتمام آب
- ۱۵) طراحی بدنه یکپارچه، جهت کاهش نویز
- ۱۶) خاموش کننده خودکار با جدا کردن مخزن آب
- ۱۷) خروجی بخار قابل چرخش ۳۶۰ درجه در دو جهت
- ۱۸) تنظیم رطوبت از ۴۰٪ تا ۸۰٪ (تغییر سطح ۵ درصدی)
- ۱۹) درب بزرگ مخزن آب، برای تمیز کردن آسان با دست
- ۲۰) میزان خروجی بخار قابل تنظیم (۳ سطح کم/متوسط/زیاد)
- ۲۱) کارتريج سختی و رسوب گیر آب مخزن، جهت طول عمر بیشتر دستگاه

دستورالعمل ایمنی قبل از استفاده

- ۱ « تمیز کردن دستگاه هنگام وصل بودن آن به برق، ممکن است منجر به شوک الکتریکی، جرقه الکتریکی و آسیب جدی شود. قبل از تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری، دستگاه را از برق جدا نمایید.
- ۲ « دستگاه را طوری قرار دهید که سیم زیاد کشیده نشود؛ سیم را زیر فرش یا موکت و اجسام دیگر قرار ندهید.
- ۳ « از این دستگاه در فضاهای محصور که در آنجا گازهای قابل اشتعال، مواد منفجره و بخارات سمی وجود دارد استفاده نکنید.
- ۴ « دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید از قرار دادن دستگاه روی سطوح ناهموار یا نرم مانند سطح تخت یا مبل خودداری کنید.
- ۵ « از قرار دادن اشیاء سنگین روی دستگاه خودداری کنید.
- ۶ « این دستگاه هوای محیط شما را مرطوب می کند و عمل تصفیه هوا را انجام نمی دهد.
- ۷ « چنانچه سیم برق و یا دوشاخه گرم شد، بوی سوختگی حس کردید و یا صدا می دهد، دستگاه را خاموش کرده و آنرا از برق بکشید سپس با مرکز خدمات پس از فروش آلمایپرایم تماس بگیرید.
- ۸ « در صورت استفاده مجدد پس از مدت زمان طولانی، مخزن آب را تمیز کنید.

با عرض پوزش به دلیل مسائل امنیتی در حمل و نقل،
باتری از ریموت کنترل دستگاه حذف شده است؛ برای
استفاده از ریموت کنترل دستگاه بخور، باتری سکه‌ای
مدل: 3V CR2025 تهیه کنید.

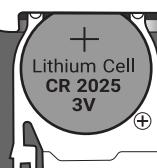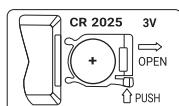

نحوه استفاده و راهاندازی دستگاه

۱) مخزن آب دستگاه را با آب مقطر یا آب تصفیه شده در صورت عدم دسترسی به این موارد، با آب جوشیده شده در دمای زیر ۴۰ درجه پر کنید. (تصویر۱)




« دستگاه را در مجاورت لوازم الکترونیکی، برقی و گرمایشی مانند بخاری قرار ندهید (تصویر۲)

۲) حتما قبل از اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق، سر راه آن از محافظ برق استفاده گردد. (تصویر۳)


۳) « دکمه روشن/خاموش را لمس کنید. دستگاه در حالت دستی با حجم خروجی متوسط و نمایش میزان رطوبت محیط بصورت درصد شروع بکار می‌کند و هر ۵ ثانیه دمای محیط را با عدد و نماد نشان می‌دهد. (تصویر۴)

احتیاط

در صورت استفاده مجدد پس از مدت زمان طولانی، مخزن آب و فیلتر سختی گیر آب و سینک داخلی را تمیز کنید و آب تمیز را جایگزین کنید.

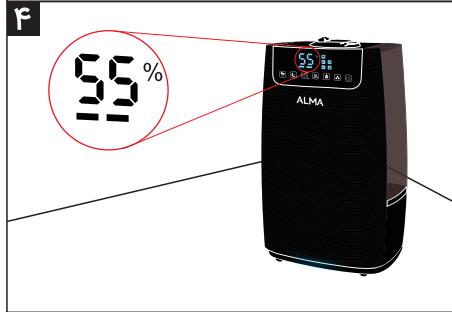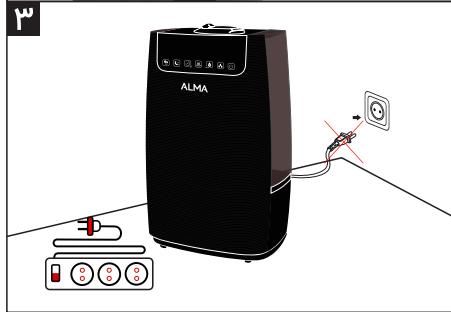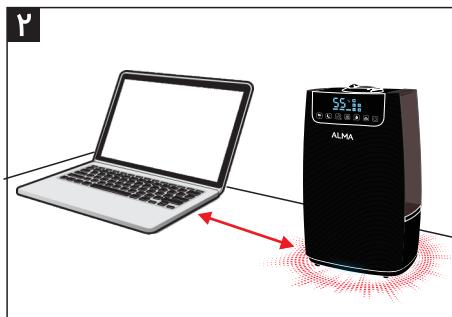

نحوه استفاده و راهاندازی دستگاه

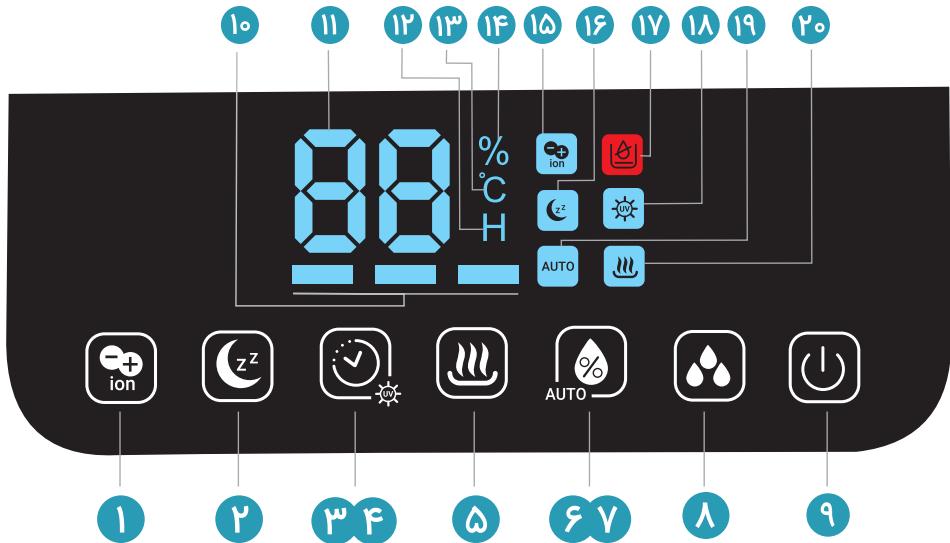

۱) دکمه یون منفی با یکبار لمس این دکمه یون منفی فعال می‌شود و نماد ظاهر می‌گردد که به استریلیز کردن هوا کمک می‌کند. با لمس مجدد آن، یون منفی غیرفعال می‌شود.

۲) « دکمه حالت شب با یکبار لمس این دکمه ، حالت شب فعال شده و صفحه نمایش خاموش می‌شود، در این حالت نماد ظاهر می‌شود و پس از ۲۰ ثانیه خاموش می‌شود، با لمس هر دکمه‌ای، دستگاه از حالت خواب خارج می‌شود.

۳) « دکمه تایمر با یک بار لمس این دکمه نماد ظاهر می‌شود و می‌توانید ۱ الی ۱۰ ساعت را برای خاموش شدن دستگاه زمانبندی کنید: (1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h). و حالت C به معنای تایмер خاموش است.

نحوه استفاده و راهاندازی دستگاه

۴ « دکمه UV

با لمس این دکمه  و نگه داشتن به مدت ۳ ثانیه، لامپ UV روشن شده و همزمان نماد ظاهر می‌شود، با روشن بودن UV به استریل کردن هوای محیط کمک می‌کند، با لمس مجدد و نگه داشتن به مدت ۳ ثانیه، این حالت غیر فعال می‌شود.

۵ « دکمه حالت بخار گرم

با لمس این دکمه ، عنصر PTC دستگاه فعال می‌شود و دمای بخار خروجی دستگاه را گرم می‌کند و نماد ظاهر می‌شود، با فشردن مجدد این دکمه، از بخار گرم به حالت بخار سرد باز می‌گردد.

۶ « دکمه تنظیم رطوبت

با یکبار لمس این دکمه ، ابتدا اعداد دیجیتال به دو خط چشمک‌زن در می‌آیند، که با هر بار لمس مجدد این دکمه، اعداد از ۴۰ تا ۸۰ با ضریب ۵ افزایش می‌یابند که با ظاهر شدن نماد  %، میزان رطوبت تنظیم شده را بصورت درصد نشان می‌دهد.

۷ « دکمه حالت خودکار

با لمس و نگه داشتن این دکمه  به مدت ۳ ثانیه، دستگاه در حالت خودکار و بخار گرم شروع به کار می‌کند و با ظاهر شدن نماد  رطوبت محیط را بین ۵۵ - ۶۸ % حفظ می‌کند و محیط را در بهترین میزان رطوبت حفظ می‌کند، در صورت تمایل به بخار سرد، بایستی دکمه ۴ را لمس کنید تا حالت بخار گرم غیر فعال گردد.

۸ « دکمه تنظیم حجم خروجی بخار

با هر بار لمس این دکمه  می‌توانید میزان خروجی بخار را در سه سطح کم، متوسط، و زیاد تنظیم کنید:



۹ « دکمه روشن / خاموش

با یکبار لمس این دکمه ، دستگاه روشن و در حالت خودکار شروع به کار می‌کند، که نماد  و % هر پنج ثانیه یکبار به ترتیب دما و رطوبت محیط را به همراه عدد نمایش می‌دهند، با لمس مجدد آن، دستگاه خاموش می‌شود.

۱۰ « نشانگر اتمام آب مخزن

با اتمام آب مخزن دستگاه، این نماد  با رنگ قرمز ظاهر می‌شود و عملکرد بخاردهی دستگاه بصورت خودکار متوقف می‌شود.

۱۱ « با بلند کردن مخزن آب به هنگام روشن بودن دستگاه، بصورت خودکار خاموش می‌شود.

نگهداری دستگاه و نظافت دوره‌ای

« تمیز نگه داشتن مخزن آب و سینک داخلی دستگاه و رسیدگی به وضعیت آب مورد استفاده، راندمان کارکرد دستگاه را بالا می‌برد.

« حتما از آب جوشیده با دمای کمتر از ۴۰ درجه برای پر کردن مخزن آب استفاده کنید.

« در صورت عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی، آب مخزن و سینک داخلی را تخلیه و خشک نمایید.



« کیفیت آب در بعضی مناطق دارای املاح بسیار است و سطح مبدل اولتراسونیک به راحتی رسوب می‌گیرد.

« در صورت عدم استفاده از ماده خوشبو کننده، پد محفظه را خارج کرده بشویید و خشک کنید و سپس در جای خود قرار دهید.

با زمانی برای تمیز شدن قسمت‌های اصلی دستگاه در جدول زیر شرح داده شده است:

بخش تمیز شونده	بازه‌ی زمانی	روش تمیز کردن و نگهداری
بدنه دستگاه	در صورت نیاز	با پارچه مرطوب و نرم که پرز نمی‌دهد بدنه را تمیز کنید.
مبدل اولتراسونیک	۲ بار در هفته	به صفحه ۱۰ مراجعه شود
مخزن آب	۲ بار در هفته	به صفحه ۹ مراجعه شود
سینک داخلی	۲ بار در هفته	به صفحه ۱۰ مراجعه شود

مراحل تمیز کردن دستگاه

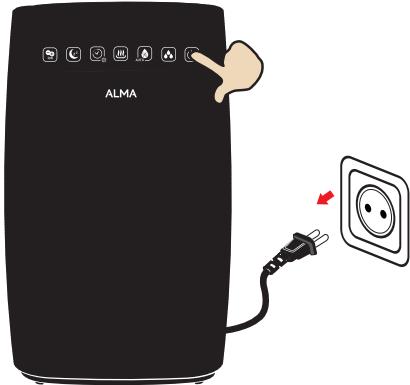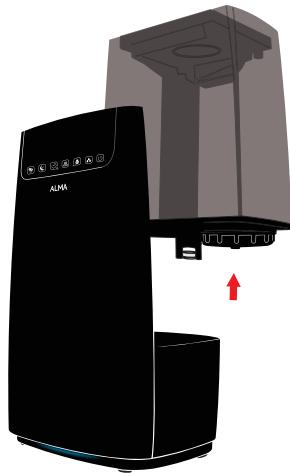

۲ « مخزن آب را با احتیاط از دستگاه جدا کنید.


۱ « دستگاه را خاموش و سیم دستگاه را از برق بکشید.



۴ « با دستمال مرطوب و آشسته به ماده تمیز کننده ظروف، داخل مخزن آب را تمیز کنید و با آب بشویید و خشک کنید.

۳ « فیلتر سختی گیر آب را خلاف عقربه ساعت بچرخانید و باز کنید و آب مخزن را خالی کنید.


مراحل تمیز کردن دستگاه

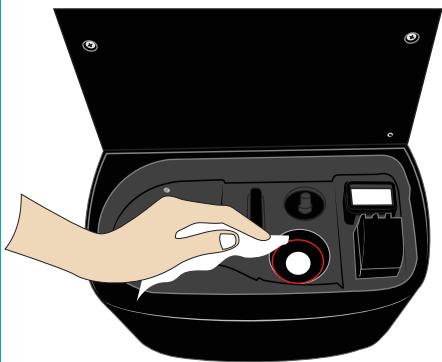


۶ « آب سینک را تخلیه کنید و با آب تمیز بشویید و در آخر با دستمال تمیز، سینک را خشک کنید.



۵ « سینک داخلی را خیس کنید و با فرجه نرم به آرامی مبدل التراسونیک را تمیز کنید و رسوبات را از بین ببرید.

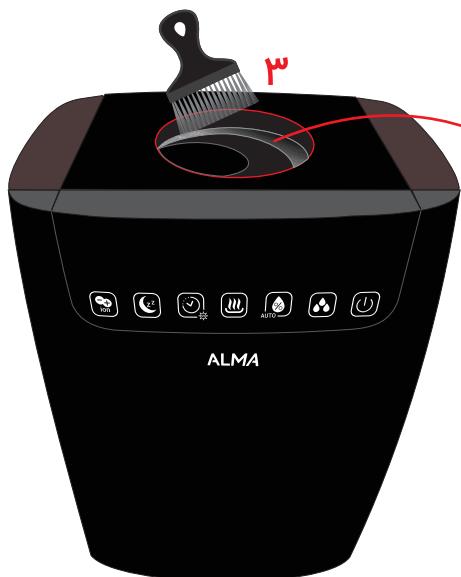

به هیچ وجه با جسم سخت و نوک تیز مبدل را تمیز نکنید و از مواد اسیدی و قلیابی استفاده نکنید!

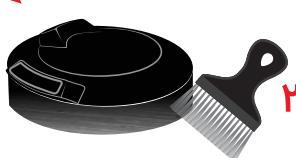

۷ « درپوش خروجی بخار را از دستگاه جدا کنید و رسوبات آب را از درپوش و جایگاه درپوش بزدایید.

فوریت‌های فنی (رفع مشکل)

مشکل ۱ « دستگاه روشن نمی‌شود:

راه حل:

- ۱) از اتصال سیم برق مطمئن شوید.
- ۲) مخزن دستگاه را درست در جای خود قرار دهید.
- ۳) از محکم بودن دوشاخه در پریز مطمئن شوید.

دلایل احتمالی:

- ۱) سیم برق به درستی متصل نشده است.
- ۲) مخزن آب در حالت درست خود قرار نگرفته است.
- ۳) دوشاخه راچ کنید.

مشکل ۲ « عدم وجود بخار:

راه حل:

- ۱) مخزن آب را پر کنید.
- ۲) از وصل بودن منبع برق اصلی مطمئن شوید.

دلایل احتمالی:

- ۱) عدم وجود آب در مخزن.
- ۲) منبع برق اصلی قطع شده است.

مشکل ۳ « بوی عجیب بخار:

راه حل:

- ۱) پد محفظه را بشویید و پس از خشک شدن مجدد جایگذاری کنید.
- ۲) درب مخزن آب را باز کنید و به مدت ۱۲ ساعت در معرض هوای آزاد قرار دهید. مخزن را تمیز کرده و آب تمیز و جوشانده شده را جایگزین کنید.

دلایل احتمالی:

- ۱) کشیف بودن پد محافظه خوشبو کننده.
- ۲) آب راکد درون مخزن و سینک.

مشکل ۴ « سرو صدای دستگاه:

راه حل:

- ۱) آب به مخزن اضافه کنید.
- ۲) دستگاه را روی سطح صاف و محکم قرار دهید(به دور از لوازم الکترونیکی و برقی)

دلایل احتمالی:

- ۱) آب کافی در مخزن وجود ندارد.
- ۲) دستگاه روی سطح صاف و محکم قرار ندارد.

مشکل ۵ « بخار از اطراف خروجی خارج می‌شود:

راه حل:

- ۱) درپوش خروجی بخار را در جای خود محکم کنید.

دلایل احتمالی:

- ۱) وجود فاصله بین خروجی و مخزن آب.

خدمات گارانتی

- ۱) ارائه کارت گارانتی یا شماره سریال فعال شده دستگاه، جهت استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
- ۲) اعتبار گارانتی: بعد از فعالسازی شروع می‌شود و به مدت ۱۲ ماه می‌باشد.
- ۳) انجام هر گونه تعمیرات، فقط در واحد خدمات پس از فروش شرکت صورت می‌پذیرد.
- ۴) هنگام ارسال کالا به دفتر خدمات پس از فروش، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایجاد دستگاه را حتماً بصورت مکتوب به شرکت اعلام نمایید.

موارد ضروری :

- ۱) ارائه خدمات گارانتی فقط با در دسترس داشتن کارت گارانتی مقدور خواهد بود.
- ۲) تشخیص موارد فوق به عهده کارشناسان شرکت خواهد بود.
- ۳) تجهیزات جانی مانند کنترل، ابزارهای جانبی و غیره شامل گارانتی نمی‌باشد.
- ۴) چنانچه پس از بررسی و تست فنی، خرابی قطعه خارج از شرایط گارانتی تشخیص داده شود، تعمیر آن در چرخه کالای خارج از گارانتی قرار خواهد گرفت.

خدمات گارانتی

موارد ابطال گارانتی:

- ۱ « مخدوش نمودن کارت گارانتی.
- ۲ « عدم تطابق مشخصات کالا با کارت گارانتی.
- ۳ « صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف، صدمات فیزیکی و عیوب فنی ایجاد شده در اثر ضربه، آتش سوزی، ورود مایعات به داخل دستگاه، نوسانات برق، مواد شیمیایی و استفاده نادرست از دستگاه (غیر از دستورالعمل کتابچه).
- ۴ « تغییر در قطعات سخت افزاری و استفاده از آدابتوهای متفرقه و وجود آثار تعimirات توسط اشخاص غیر مجاز هرگونه ایراد ناشی از بکارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف که موجب اختلال در کارکرد دستگاه می باشد.

خواهشمند است اگر مغایرتی در نوع عملکرد دستگاه با توضیحات دفترچه راهنمای مشاهده نمودید، اصلاحات مورد نظر را از طریق راههای ارتباطی زیر به اطلاع برسانید: آخرین تغییرات اعمال شده در سایت آلمپرایم قابل مشاهده می باشد.



<https://almaprime.com/ap-manuals/>

از طریق پیامک: ۱۰۰۰ ۴۱ ۰۰ ۴۲


ایнстاگرام: almaprime

شبکه های اجتماعی: ۰۹۹۰ - ۹۲۹ ۹۰ ۶۰

ALMA

Warm & Cool Humidifier

HCW-373

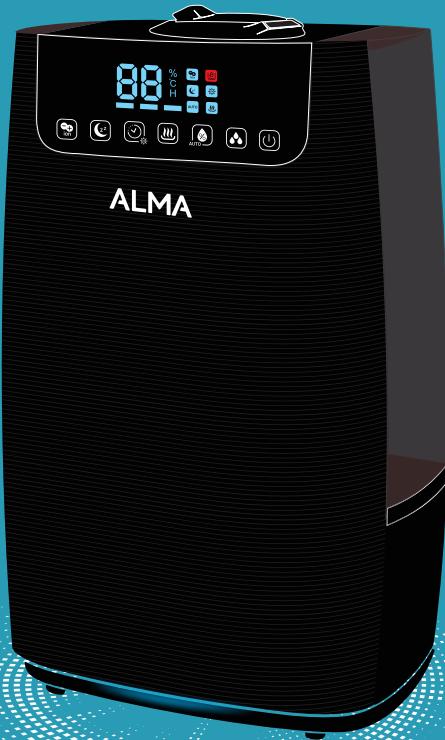

امور مشتریان: ۰۲۱ - ۶۶ ۴۰ ۲۰۰۰

خدمات پس از فروش: ۰۲۱ - ۶۶ ۴۱ ۰۰ ۴۲

almaprime

almaprime.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان خمینی، پلاک ۳۰۷

شعبه ۱: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان خمینی، پلاک ۳۱۱

شعبه ۲: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان آذربایجان، پلاک ۱۰۷۶

آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمسآباد